


SNICKARBOA



i Rämshyttan AB

Bruksanvisning Förhöjningskloss

Förhöjningsklossarna kan användas till kvadratiska, rektangulära och ovala ben upp till 6,5 cm x 6,5 cm. Runda ben upp till 6,5 cm i diameter.

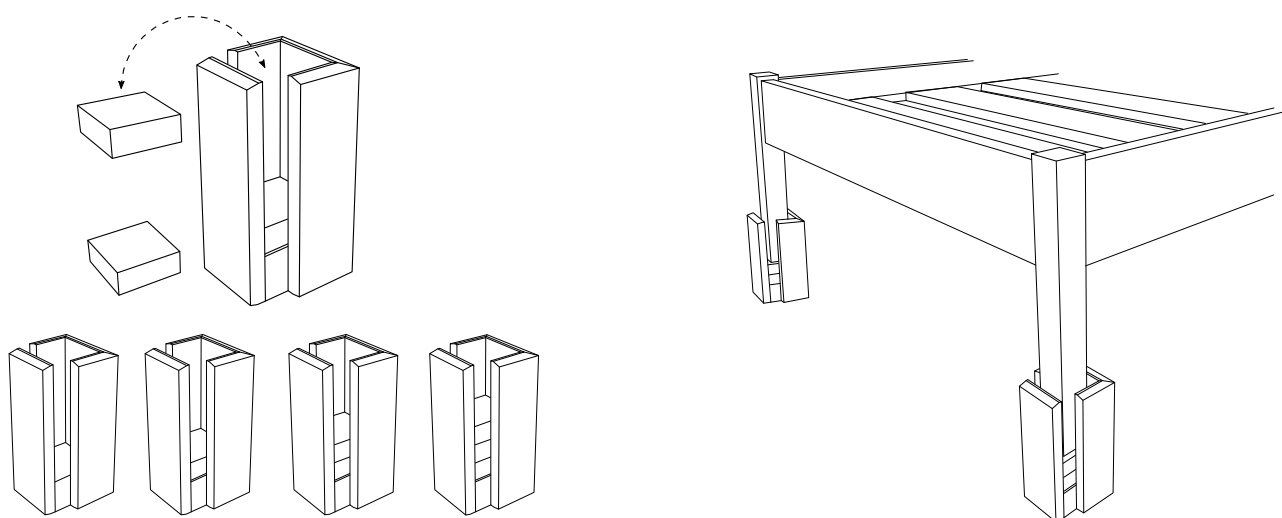

Placera iläggsklossarna (**observera maximal höjning**) i förhöjningsklossen för att uppnå önskad höjd.

Placera möbelns ben centrerat i förhöjningsklossen för bästa stabilitet. **Kila aldrig fast klossen.**

Viktigt att veta

Det är mycket viktigt att inse att förhöjning med tillsatser kan medföra ökad instabilitet av möbeln. Om brukaren sätter eller lägger sig på ett okontrollerat sätt kan möbeln ha ökad risk för tippning. Det är därför tillbörligt att försöka öka stabiliteten genom att placera möbeln mot en eller två väggar som extra stöd. Försök aldrig att pressa ner ett ben i förhöjningsklossen och kila aldrig fast förhöjningsklossen mot benet då det kan påverka förhöjningsklossens hållbarhet.

De medföljande iläggsklossarna ger ett förhöjningsområde mellan 4,5 cm och 12 cm från golvet. Höj aldrig mer än 12 cm från golvet då instabiliteten kan öka varvid möbeln kan tippa och brukaren kan skadas.

Det ligger på utprovarens/medhjälparens ansvar att brukaren säkerhet inte påverkas. Kontrollera förhöjningsklossarna regelbundet om skador har uppstått på dem eller om benen har förskjutits i förhöjningsklossarna. Använd aldrig skadade förhöjningsklossar.

Rämshyttan 2016-02-09



Adress

Rämshyttan 348
781 99 IDKERBERGET

Telefon

0240-263 90
070-69 11 775

Fax

0240-263 89

Bankgiro

5979-7225

Org.nr.

556517-0338

Internet

www.snickarboa.se
snickarboa@telia.com