

## Monteringsanvisning Gipsbenstöd för Panthera Bambino



Bild 1

Bild 1: Gipsbenstöd monterad på rullstol. Gipsbenstödet kan monteras för vänster eller höger ben genom att vända på det.

Bild 2: Där sits och rygg möts, finns en öppning på var sida där spännremmarna träs igenom.

Bild 3: Remmarna spänns runt det tvärgående staget på baksidan av rullstolen. Observera att remmarna skall träs på insidan av vajern som man fäller ryggstödet med.

Bild 4: Korrekt montering av spännremmar sedd bakifrån.

Bild 5: Korrekt montering sedd framifrån.



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5