

## Montering och rengöring av Gipsbenstöd för Panthera Bambino, Bambino 3, S2 och S3



Bild 1

Bild 1: Gipsbenstöd monterad på rullstol. Gipsbenstödet kan monteras för vänster eller höger ben genom att vända på det.

Bild 2: Där sits och rygg möts, finns en öppning på var sida där spännremmarna träs igenom.

Bild 3: Remmarna spänns runt det tvärgående staget på baksidan av rullstolen. Observera att remmarna skall träs på insidan av vajern som man fäller ryggstödet med.

Bild 4: Korrekt montering av spännremmar sedd bakifrån.

Bild 5: Korrekt montering sedd framifrån.

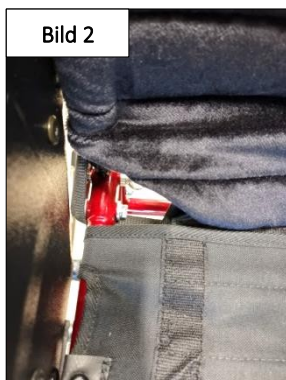


Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

### Rengöring och rekonditionering

Rengöring och rekonditionering görs för hand genom att hela produkten torkas av med ytdesinfektionsmedel.

**Adress**

Rämshyttan 348  
781 99 Idkerberget

**Telefon**

0240-263 90  
070-69 11 775

**Bankgiro**

5979-7225

**Org.nr.**

556517-0338

**Internet**

www.snickarboa.se  
snickarboa@telia.com