

Montering och rengöring av Gipsbenstöd för Panthera Bambino

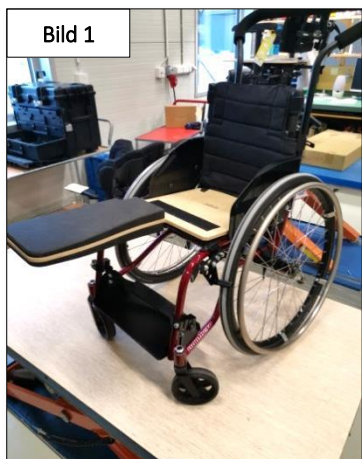



Bild 1: Gipsbenstöd monterad på rullstol. Gipsbenstödet kan monteras för vänster eller höger ben genom att vända på det.

Bild 2: Där sits och rygg möts, finns en öppning på var sida där spännremmarna träs igenom.

Bild 3: Remmarna spänns runt det tvärgående staget på baksidan av rullstolen. Observera att remmarna skall träs på insidan av vajern som man fäller ryggstödet med.

Bild 4: Korrekt montering av spännremmar sedd bakifrån.

Bild 5: Korrekt montering sedd framifrån.

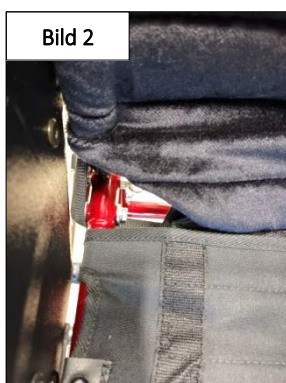

Rengöring och rekonditionering

Rengöring och rekonditionering görs för hand genom att hela produkten torkas av med ytdesinfektionsmedel.

Adress

Rämshyttan 348
 781 99 Idkerberget

Telefon

0240-263 90
 070-69 11 775

Bankgiro

5979-7225

Org.nr.

556517-0338

Internet

www.snickarboa.se
 snickarboa@telia.com